

GARANTIE
5 ANS



FICHE TECHNIQUE I.20

COFFRES INTERIEURS AVEC ÉCLAIRAGE LED POUR DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES



PRÉSENTATION

Le coffre intérieur I.20 est un coffre universel qui s'adapte à tous les défibrillateurs. Il se compose d'un capot transparent personnalisable (selon le volume commandé) et d'une barre de maintien. Il est conçu pour une installation intérieure avec un système d'alarme et de Led.

Le coffre est conçu en Polypropylène (PP) et le capot en Polyéthylène (PET Grifen), 100% recyclable (matière résistante aux chocs, isolante, imputrescible et traitement ignifugé).



Léger afin de réduire les coûts de transport (limite l'impact carbone).

Design novateur et moderne.
Fabrication Française.



SIGNALÉTIQUE

- Sur le coffre, fiche de suivi de la maintenance des défibrillateurs.
- A l'intérieur du coffre, un QR code renvoie aux fiches techniques des différents modèles.
- Sur le capot transparent, traité anti-UV, un facing personnalisable est affiché.
- Les différents logos et labels AED DAE et le coeur normés sont moulés sur le capot transparent, traité anti-UV (Grifen).



www.sdns.tech



1 massage cardiaque + 1 défibrillateur
c'est 10 fois plus de chance de survie !

Appeler les secours
au 15 ou 18
ou 112

Masser la victime
sur une base
de 100 à 120
compressions /min

Défibriller
en attendant
l'arrivée des
secours sur place

SDNS TECH ☎ 04 80 81 94 80 ou 06 98 31 24 08
contact@sdns.tech | www.sdns.tech | 10 rue de la République - 21000 Dijon - France

4 COULEURS DISPONIBLES POUR VOTRE COFFRE



GARANTIE
5 ANS



FICHE TECHNIQUE I.20

Lire attentivement la notice d'utilisation et le mode d'emploi.

Les coffres SDNS TECH sont conçus pour recevoir des défibrillateurs automatisés externes (DAE).

Les coffres I.10 et I.20 sont conçus pour être installés en intérieur.

Les coffres E.30 et ES.40 sont conçus pour être installés en extérieur.

Les coffres ne remplacent pas les contrôles et les maintenances obligatoires des DAE selon les protocoles de chaque fabricant.

Attention, lors de l'installation du coffre veuillez retirer le film plastique présent sur le capot transparent. La visserie n'est pas comprise.

GARANTIE

Les coffres SDNS TECH sont garantis 5 ans (hors composants électroniques garantis 2 ans) à partir de la date d'acquisition par le distributeur auprès de la société D-SECURITE GROUPE qui est le Distributeur exclusif.

Toutes modifications du modèle I.20 annulera la garantie.

Dès la réception des coffres, vérifier la conformité des produits et, en cas de défaut ou de non-conformité, en informer immédiatement par écrit D-SECURITE GROUPE et lui communiquer toutes les informations susceptibles de caractériser la nature du défaut constaté.

Sont également exclus de toute garantie l'usure normale des coffres, toute conséquence d'une négligence, d'un défaut de surveillance ou d'entretien, d'une fausse manœuvre non imputable à D-SECURITE GROUPE, d'une utilisation non conforme aux spécifications, d'une modification ou réparation effectuée sans l'accord écrit de D-SECURITE GROUPE, d'une installation non effectuée par D-SECURITE GROUPE ou d'une installation inadéquate de la part du client.

Aucune réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra être présentée plus de 15 jours à compter de la découverte de la cause de la réclamation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matériel du coffre : PP (Polypropylène)

Matériel du capot : PET Griffen (Polyéthylène)

Poids des principaux composants du coffre :

- Coffre sans capot : 0.859 kg

- Capot sans coffre : 0.224 kg

- Carte électronique, piles, aimant : 0.231 kg

- Poids global : 1.3 kg

Dimensions : L 390 mm / H 467 mm / P 210 mm

La durée de vie des piles (LR6 x3) fournies, est supérieure à 2 ans avec capot fermé, en fonctionnement normal.

FONCTIONNEMENT

Le coffre I.20 dispose d'un système d'éclairage LED.





En mode jour, les leds sont de couleur verte, actives toutes les 2 secondes.

Lorsque le capot est ouvert : les leds clignotent en rouge toutes les 2 secondes et l'alarme sonne. L'alarme sonore est active par intermittence toutes les 32 secondes.

Lorsque les piles sont de faible puissance et le capot fermé, des leds rouges clignotent toutes les 2 secondes, avec bip sonore toutes les 20 secondes.

À une intensité maximale de 100 dB et une tension de 12 V, le niveau sonore diminue à 90 dB en fonctionnement normal.

Les pièces et consommables peuvent être commandés séparément.

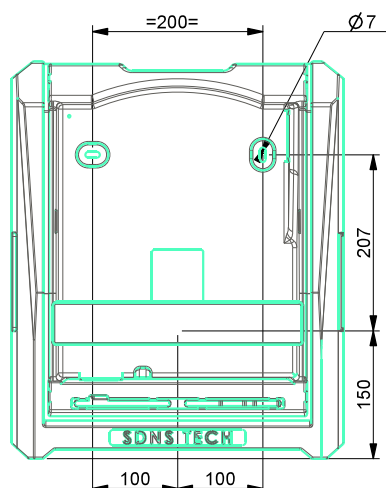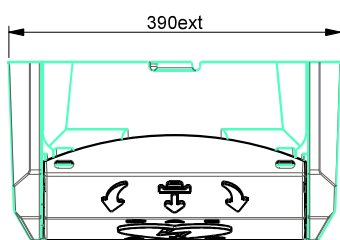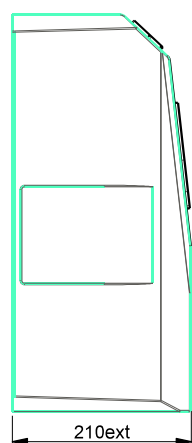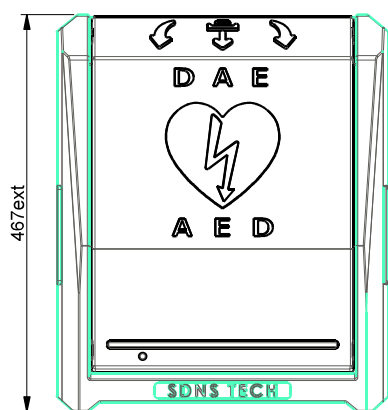

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Ce certificat atteste que le produit ci-dessous est conforme aux spécifications indiquées et a été testé conformément à nos obligations, conformément à la norme BS EN ISO 9001:2015. Il confirme également - le cas échéant - que les produits sensibles à l'électricité statique ont été manipulés et emballés avec soin conformément aux réglementations et conditions techniques ANSI/ESD S 20.20:2014 et électrostatiques BS EN 61340-5-1:2016.

En complément et en équivalence la Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Le bloc de puissance est conforme à la directive (2014/35/EU) – EN62368-1 :2014+A11 :2017
EN 55032 :2015 Class B // EN 61000-3-2 :2014 // EN 61000-3-3 :2013

EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) : EN 55024 :2010+A1 :2015

Informations du ou des produits

Modèles

I10 / I20 / E30 / ES40

Description du produit

Coffre pour défibrillateur

Marque/modèle :
SDNS.TECH



Déclaration de Conformité RoHS

Directive EU 2011/65/EU et (EU)2015/863 limite l'utilisation des 10 substances dans la fabrication de certains types d'équipement électrique.

Pour les accessoires tels que poteaux et supports de pose en extérieur la méthode d'essai et de sécurité passive fait référence à la NF EN 12767.

V3 - 07.03.2024 - EL



Fabrication Française

4



www.sdns.tech | contact@sdns.tech
06 10 15 76 75
Distributeur exclusif : D-Sécurité Groupe

Distribué par

