

4. L'insertion des piles ne remet pas l'appareil en marche. En mode Activation du contrôle ponctuel, l'appareil s'allume à l'insertion d'un doigt dans le capteur.

REMARQUE : Une fois les piles retirées en mode pile faible, l'appareil conserve l'heure et la date pendant 30 secondes maximum. Après avoir remplacé les piles, vérifiez l'écran de l'appareil au démarrage pour vous assurer que la date et l'heure sont réglées. Si le niveau des piles est critique ou en dessous de ce seuil, les paramètres de l'horloge sont perdus et si l'appareil est en mode Activation programmée, il repasse en mode Activation du contrôle ponctuel. Utilisez le logiciel nVISION pour synchroniser l'horloge et confirmer que l'appareil est en mode d'activation souhaité (reportez-vous à « Accès aux paramètres de nVISION » page 34).

Fixation du bracelet

Le WristOx₂, modèle 3150 a été conçu pour être appliqué au poignet du patient à l'aide d'un bracelet.

Cette section contient les instructions sur la manière de fixer le bracelet sur l'appareil. Dans la section « Application sur le patient », consultez les instructions sur la manière d'appliquer l'appareil sur le patient.

Description du bracelet

Deux bracelets sont disponibles pour une utilisation avec le WristOx₂, modèle 3150 : un bracelet à usage multiple et un bracelet jetable à usage unique.

Le bracelet à usage multiple se compose d'un segment long, d'un segment court et d'un anneau en plastique (figure 6). Le bracelet se fixe sur l'appareil et le patient au moyen d'attaches à bouclettes de nylon.

Le segment long est muni de deux attaches permettant d'adapter le bracelet à diverses tailles de poignets.

Les figures 7 et 8 montrent comment attacher le bracelet à usage multiple à l'appareil. La figure 9 montre l'avant et l'arrière du bracelet attaché.

La figure 11 montre comment attacher le bracelet à usage unique à l'appareil.

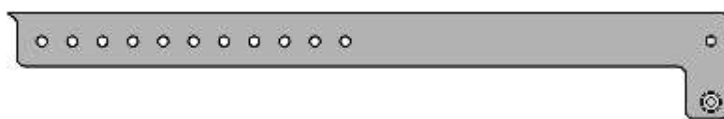


Figure 10 : Bracelet à usage unique

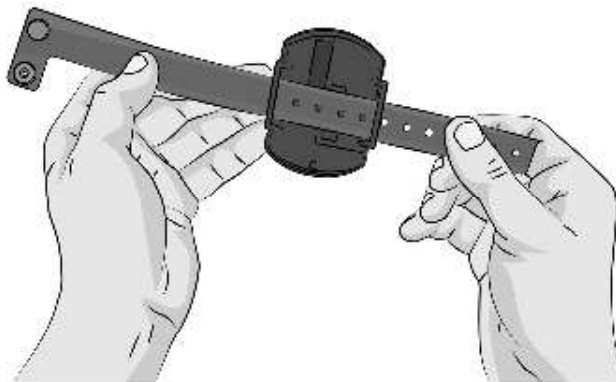
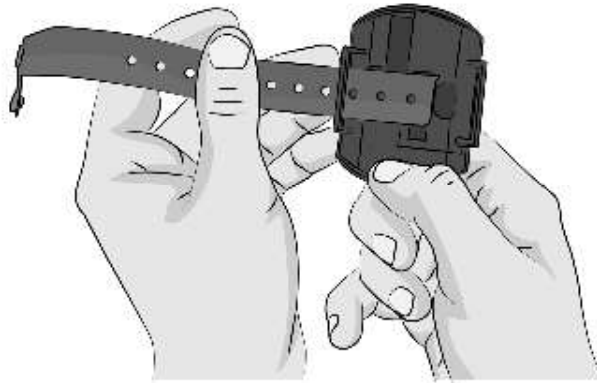


Figure 11 : Appareil avec bracelet à usage unique attaché